


Kortbruksanvisning Infusomat® Space

Software L03

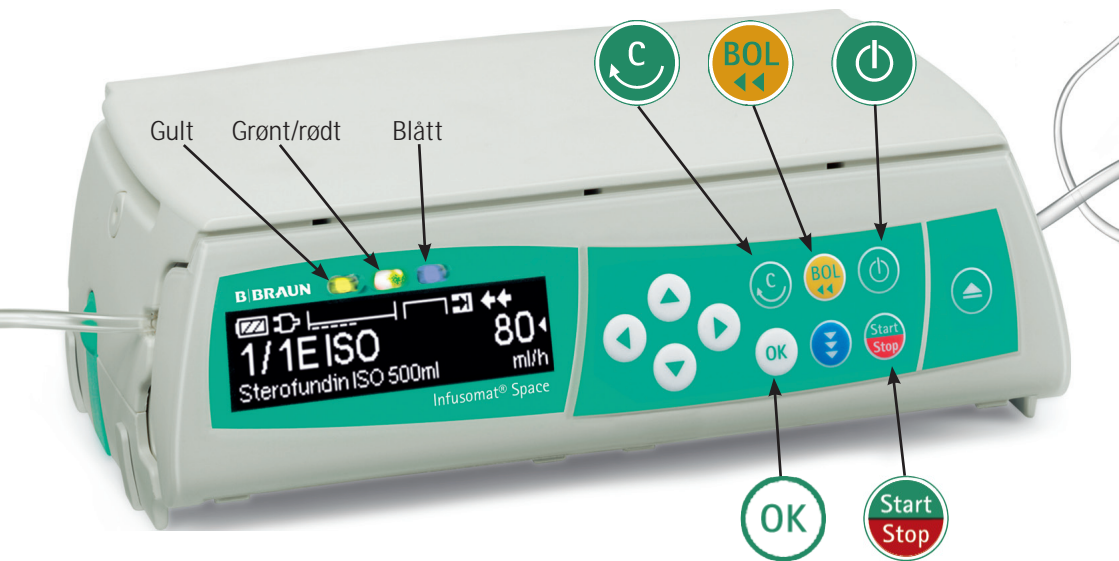







Benytt kun anbefalt engangsutstyr!

Okklusjonstrykk: maks. 900 mmHg (1,2 bar).






1. Trykk for å skru på pumpen.
2. Trykk deretter for å åpne døren.
3. Lukk rulleklemmen, og sett inn infusjonssettet fra høyre til venstre, i samsvar med brukermanualen.
4. Steng døren til pumpen og velg riktig infusjonssett med eller . Bekreft med eller .
5. På spørsmålet "Fyll slange (17,1 ml)?" så trykk "Ja" hvis du vil at pumpen skal fylle (prime) infusjonssettet. Hvis det allerede er gjort manuelt så trykk "Nei" .
6. På spørsmålet "Bruk forrige terapi?" så trykk "Ja" for å benytte samme data som ved forrige terapi (infusjon). Trykk "Nei" for å legge inn nye infusjonsdata. Hvis det velges "Ja" må det i tillegg besvares om de forrige infusjonsdata skal nullstilles.
7. Tast inn ønsket infundert totalvolum med . Bekreft med .
8. Sett "Rate" ved å trykke og still inn ønsket hastighet med . Bekreft med . Parameter for "Tid" finnes to linjer lavere enn "Rate", og kan stilles inn på samme måte.
9. Start infusjonen med .
- Demp evt. pre-/og påminnelsesalarm hvert 2. minutt med .
- For bruk av "Spesialfunksjoner" og "Opsjoner", se brukermanualen.
- Trykk og hold i 3 sekunder for å slå av enheten. Pumpen kan ikke slå av med innsatt infusjonssett. (se "bruksanvisning standby")

Status:











Statusavlesning kan foretas på to ulike måter:

- På de nederste linjene i driftsdisplayet mens infusjonen pågår, ved å bruke  eller .
- I statusmenyen (fungerer ved både stans og i drift):
 - Trykk 
 - Trykk  til Statusmenyen. Gå inn i menyen med  eller 

Nullstilling:

- Trykk 
- Trykk  til Statusmenyen.
- Trykk  inn i Statusmenyen.
- Trykk  ved "Gitt volum".
- Svar "Ja" til "Nullstill?" med .








Bruk av standby:

- Stans infusjonen med 
- Trykk på , svar "Ja" til "Standby" med . Alternativt, hold inne  i 3 sekunder. Pumpen er nå i standby.
Endre standby-tid; Trykk  eller . Endre tid med . Bekreft med 
- Standby kan avbrytes med  eller 

Bolus:

Bolus gis mens infusjonen pågår.





Bolus med innstilt volum:

- Trykk . Evt. trykk  for å endre enhet.
- Trykk  og tast inn bolusmengde med 
- Start bolus ved å trykke . Alternativt, trykk  før bolus startes for å sjekke/justere bolustid.
Trykk deretter  for å starte bolus.
Bolus kan avbrytes med  eller 

Manuell bolus:

- Trykk 
- Hold inne . Bolus gis til  slippes. (Max 10 sek.)

Avslutte infusjon:

- Stopp infusjonen med 
- Lukk rulleklemmen.
- Trykk på  og på spørsmålet "Åpne dør?" så trykk "Ja"  for å åpne døren
- Åpne døren helt ned og trykk inn grønn utløserknapp på innsiden av fronten (merket med PRESS)
- Ta ut infusjonssettet, fra venstre mot høyre.
- Lukk døren og skru av pumpen ved å trykke -knappen i 3 sek.